

# 液晶体温計 ミニチェック


VOL.1

## 特徴:

いつでも、どこでも携帯できる、電池不要で繰り返し使える“ecoな体温計”です。!口

ASTM(米国材料試験協会)の正確性基準を満たしております。ガラス性でも無く、水銀も使用しておりません。

安心・安全にご使用頂けます。カードフォルダー一面に印刷致しますので、ノベルティーとしても大好評です!

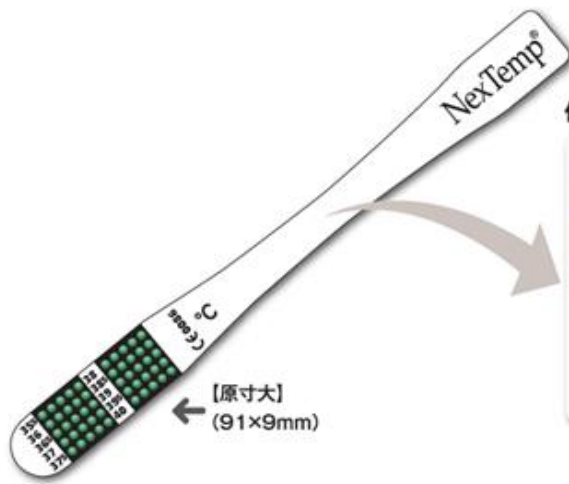

## 使い終わったらケースへ

※使用後は、消毒液も水でも構わずに収納口に差し込んでください。

※使用上の注意  
 ・個人用の体温計です。使い回しをしないでください。  
 ・感染が疑われる場合は再使用はしないでください。  
 ・レンズが曇る場合は、お湯の下で使用してください。  
 ・レンズで曇る、気泡を見ないでください。  
 ・レンズを日光の直射で乾かさないでください。  
 ・幼児や高齢者のご使用には、保護者の監視をお願いします。

—販売事業者—  
 一般社団法人 生活福祉科学体計社(3688900) 製品名: NexTemp ミニチェック サイズ: 91×9mm  
 医療機器届出番号: 13B3X1014900T001 製造業者: メディカルインテグレーション(株)インフラ  
 製造所住所: 株式会社 東芝 東京都中央区東船場1-10-10  
 販売所住所: 東京都中央区 東船場1-10-10  
 FDA・CEマーク登録済 検定番号: 検定器 検定器 検定器 検定器 検定器 検定器 検定器 検定器 検定器 検定器

## サイフにしまえます



## ■超薄型コンパクト

ミニチェックは長さ91mm×最大幅9mm、厚さ0.25 mmの超薄型スティックタイプのコンパクトボディ。

## ■正確

厳正な臨床条件のもと色が変わるよう作られており、ASTM（米国材料試験協会；American Society for Testing and Materials）の正確性基準を満たしています。

※精度は平均的な体温である  
36度～39度の範囲内では  
誤差±0.1度。その他の温度  
でも±0.2度と非常に高い。



## ■安全

ガラス製でなく、水銀も使用していないので壊れにくく、液もれもなく安全にお使いいただけます。しかも、ノーバッテリーで電池切れの心配もありません。

## ■安心

発祥の米国ではすでにドラッグストアなどで販売され認知、普及している商品なので安心です。

米国

<FDA(アメリカ食品医薬品局)承認 880.2900>

欧州

<欧州 医療機器 CE 0086>

日本国内

<厚生労働省 医療機器届出番号 13B1014900T001 >

## ■いつでも、どこでも

ミニチェック本体は、クレジットカード型ケース（天地 56mm×左右 88mm）に収納し、サイフやバッグに入れていつも持ち歩くことができます。旅行やレジャー、お出かけ、出張などにも大変便利です。



## ■計り方も簡単

ミニチェックは舌の下で1分、脇に挟んで3分で計測でき、お子様からお年寄りまでどなたでも簡単にお使いいただけます。  
注) 幼児、高齢者のご利用時には保護者などの監視のもとご使用ください。



## ■繰り返し何度でも

使用前後は水やアルコールなどで洗い、乾燥させて使用すれば何度でも使用できます。  
注) 感染が疑われる場合は再使用しないでください。

## ■カードフォルダーに印刷可能です。

カード表側には、印刷も承ります。  
ノベルティーとしてもご使用下さい。

## 形状と仕様



- 内 容 : 体温計(長さ 91mm×幅 9mm×厚さ 0.25mm)1ヶ  
収納ケース(天地 56mm×幅 88mm×厚さ 1mm)1ヶ
- 一般医療機器／色調表示式体温計
- FDA(アメリカ食品医薬品局)承認880. 2900
- 欧州 医療機器CE0086
- 厚生労働省 製造販売承認届出番号13B1014900T001
- 製造元 : アメリカ合衆国・メディカル・インジケーター・インク

	質量	サイズ
	重さ(g)／数量(ヶ/ケース)	寸法(幅×高さ×奥行き)
個包装	6g(1個)	120×65
サブカートン	-----	-----
マスターカートン	6,600g(1,000個)	350×140×350

本商品のお問合せは、下記のエルサム事業部までお願い致します。



**明和産業株式会社**

上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。□  
予めご了承ください。

東京都台東区元浅草3-13-14  
エルサム事業部  
TEL : 03-3843-7730  
FAX : 03-3843-8959